

- Dès la réception du masque, le laver à 30°.

METTRE SON MASQUE

- Se laver les mains avec du savon ;
- Mettre le masque et l'ajuster. Il doit couvrir du nez au menton (gorge) ;
- Si celui-ci est trop grand au niveau du cou, vous pouvez plier la partie inférieure du masque. S'il est trop grand sur les cotés, vous pouvez faire un nœud avec les élastiques.
- Une fois en place ne pas le toucher ;
- Le masque doit être porté maximum 3h-4h ou jusqu'à ce qu'il soit humide.

RETIRER SON MASQUE

- Se laver les mains avec du savon
- Enlever le masque par les élastiques (ne surtout pas toucher le tissu) ;
- Laver directement le masque à 30° minimum ;
- Se laver les mains avec du savon ;
- Sécher le masque à l'air libre sur un support désinfecté, une fois sec le repasser au fer (à vapeur de préférence) et le stocker dans un sachet ou boîte hermétique.

LAVAGE

- 30° en machine avec sa lessive habituelle (pas d'eau de javel ni assouplissant) ;
- ou faire frémir de l'eau dans une casserole/bouilloire, et mettre le masque pendant 30 min dans un récipient avec couvercle et un peu de lessive.



ATTENTION

- *Ce masque barrière n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/, ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425.**
- *Si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté, demandez l'avis de votre médecin.**
- *Ce masque n'est pas à destiné au personnel soignant.*
- *Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. Il est recommandé de porter ce masque sur une peau nue, le port de la barbe peut réduire l'efficacité de filtration. **
- *Ce masque barrière ne remplace pas les gestes barrière (lavage régulier des mains, distinction physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique permettant à l'utilisateur de protéger son environnement contre les projections des particules. Il peut également apporter à l'utilisateur une protection limitée contre les agents infectieux. **
- *Le masque est composé de deux épaisseurs de tissu en coton neuf.*
- *Les masques n'ont pas été testés en laboratoire et ne peuvent être certifiés.*
- *Une surveillance est obligatoire lorsqu'un enfant porte un masque.*
- *Les lavages peuvent détériorer le masque, si le tissu ou les élastiques s'abiment ou s'il devient difficile de respirer avec le masque, il faudra le changer.*
- *Si l'utilisation de plusieurs masques est nécessaire durant la journée hors de votre domicile, mettre les masques utilisés dans un sac ou une boîte hermétique et les laver en arrivant chez vous.*

*(*sources Afnor)*